

Osmo Soft

Brûlures & Coups de soleil

Tube de 50g ou de 150g

Composition :

CARBOMERES, OCTANEDIOL, GLYCEROL, POLYETHYLENEGLYCOL, SODIUM HYDROXYDE, EAU PURIFIÉE.

Indications :

OSMO SOFT est un hydrogel destiné au traitement des brûlures superficielles (douleurs, rougeurs et apparition de cloques sur une surface peu étendue) : brûlures domestiques, coups de soleil...

Propriétés :

- Apaise : limite l'élévation de la température.
- Réduit la rougeur cutanée.
- Réhydrate les couches superficielles de la peau et favorise la réparation cutanée.

OSMO SOFT ne contient pas de conservateur.

Mode d'emploi :

Voie cutanée. Appliquer OSMO SOFT sur toute la surface de la brûlure en procédant à de légers massages. Laisser pénétrer. Répéter l'application 2 à 3 fois par jour.

Contre-indications :

- Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants d'OSMO SOFT.
- Ne pas appliquer sur des brûlures profondes (2nd degré profond et 3^{ème} degré) ni sur des brûlures infectées.
- Ne pas appliquer sur une peau écorchée.

Précautions d'emploi :

Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux.

Effets non souhaités et gênants :

L'application d'OSMO SOFT peut s'accompagner de sensation de picotement. Dans certains cas rares, OSMO SOFT peut entraîner des douleurs locales, transitoires, parfois intenses et sans gravité.

En cas de douleur, rincer abondamment la peau à l'eau.

Ne pas hésiter à demander l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin et à signaler tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Conservation :

A conserver à température ambiante (entre 15-25°C) ; éviter toute source de chaleur. Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS



Dispositif Médical

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE
Place Lucien Auvert - 77020 Melun Cedex

Sous licence Alpha Fi

